

Procedura Konserwacji Urządzeń



Przygotowanie przed rozpoczęciem pracy

Dla obu urządzeń (Labumat 2 + Urised 3 Pro):

1. Sprawdź poziomy baniaków z **wodą i ściekami**
 2. Sprawdź materiały zużywalne:
 - **Labumat 2:** Uzupełnij **paski**
 - **Urised 3 Pro:** Uzupełnij **kuwety**
 3. **Dezynfekcja** 2% roztworem podchlorynu sodu
 4. Wykonaj kontrolę/kalibrację:
 - **Labumat 2:** Kalibracja PMC + Kontrola **pozytywna i negatywna**
 - **Urised 3 Pro:** Kontrola **pozytywna i negatywna**
-



Przygotowanie aparatu po zakończonej pracy – codziennie

Labumat 2:

1. Opróżnij zasobnik z paskami → zamknij w tubie
2. Opróżnij kosz z **zużytymi paskami**
3. Opróżnij zbiornik ze **ściekiem**
4. Wyciągnij i wykonaj konserwację (*umyj wodą z mydłem, wysusz, zdezynfekuj, po wyschnięciu włóż do aparatu*):
 - grzebień
 - tackę
 - płytkę od pipetowania
5. **Dezynfekcja** 2% roztworem **podchlorynu sodu** (co drugi dzień 5% roztworem)

Urised 3 Pro:

1. Opróżnij kosz z **zużytymi kuwetami**
 2. Opróżnij baniak ze **ściekami**
 3. Wyciągnij i wykonaj konserwację **mostków (prawy i lewy)** (*umyj wodą z mydłem, wysusz, zdezynfekuj, po wyschnięciu włóż do aparatu*)
 4. Wyczyść (*delikatnym gazikiem + mocno stężonym alkoholem*):
 - oczko mikroskopu
 - czujnik kuwet
 5. **Dezynfekcja** 2% roztworem **podchlorynu sodu** (co drugi dzień 5% roztworem)
-



Procedura Konserwacji Urządzeń



Przygotowanie aparatu po zakończonej pracy – raz w tygodniu

Labumat 2:

1. Opróżnij zasobnik z paskami → zamknij w tubie
2. Opróżnij kosz z **zużytymi paskami**
3. Opróżnij zbiornik ze **ściekiem**
4. Wyciągnij i wykonaj konserwację (*umyj wodą z mydłem, wysusz, zdezynfekuj, po wyschnięciu włóż do aparatu*):
 - grzebień
 - tackę
 - płytkę do pipetowania
5. Wyczyść i wykonaj konserwację:
 - powierzchnie zewnętrzne
 - powierzchnie wewnętrzne (szczególnie okolice płukania igły)
 - podajnik
6. **Dezynfekcja 5% roztworem podchlorynu sodu**

Urised 3 Pro:

1. Opróżnij kosz z **zużytymi kuwetami**
2. Opróżnij baniak ze **ściekami**
3. Wyciągnij i wykonaj konserwację **mostków (prawy i lewy)** (*umyj wodą z mydłem, wysusz, zdezynfekuj, po wyschnięciu włóż do aparatu*)
4. Wyczyść (*delikatnym gazikiem + mocno stężonym alkoholem*):
 - oczko mikroskopu
 - czujnik kuwet
5. Wyczyść **osłonę wirówki**
6. Wyczyść i wykonaj konserwację:
 - powierzchnie zewnętrzne
 - powierzchnie wewnętrzne (szczególnie okolice płukania igły)
 - podajnik
7. **Dezynfekcja 5% roztworem podchlorynu sodu**



Dokument przeznaczony do codziennego użytku przez personel medyczny/laboratoryjny.



A R G E N T A

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 669 06 50 e. serwis@argenta.com.pl w. www.serwis.argenta.com.pl