



ARGENTA

EKSPERCI Z MISJĄ

Instrukcja aktualizacji analyzera Siemens epoc[®]



Autoryzowany
dystrybutor
i partner
serwisowy

SIEMENS
Healthineers

ARGENTA.COM.PL

Instrukcja aktualizacji analyzera Siemens epoc®

Aktualizacja analizatora z niższej wersji oprogramowania niż 4.11.11 bezpowrotnie zablokuje aparat.

1



Przygotowanie urządzenia

Podłącz analizator do zasilania (nie aktualizuj na baterii).
Sprawdź wersję oprogramowania
(aktualizacja możliwa wyłącznie z wersji z 4.11.11 → 4.12.6 → najnowsza 4.15).



Aktualizacja analizatora z niższej wersji oprogramowania niż 4.11.11 bezpowrotnie zablokuje aparat.

2




Pobranie plików

Pobierz najnowszy plik aktualizacyjny (np. epoc NXS.4.15.7a)
z oficjalnego źródła.

[Pobierz >](#)

<https://doclib.siemens-healthineers.com/documents?search=Epoc&products=19187&productgroups=1&documenttypes=321&countries=171&sortingby=-modified-at&languages=2,11>


3

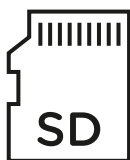

Przygotowanie karty micro SD

Sformatuj kartę w systemie FAT32 (GUIFormat, MiniTool, AOMEI).
Skopiuj plik aktualizacji do głównego katalogu karty
(tylko jeden plik, bez zmiany nazwy).

4

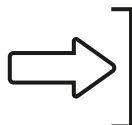

Włożenie karty do analizatora

Umieść kartę w dedykowanym gnieździe **Siemens epoc® NXT**.

5



Logowanie i wybór aktualizacji

Włącz urządzenie.
Zaloguj się: login: **administrator**, hasło: **administrator**.

W menu wybierz: OPCJE → USTAWIENIA → **Aktualizuj Host z karty micro SD**.

6



Rozpoczęcie aktualizacji

Potwierdź aktualizację.
Nie odłączaj zasilania ani karty podczas procesu.

7



Zakończenie

Po komunikacie o skutecznej aktualizacji,
urządzenie może się zrestartować.
Sprawdź wersję oprogramowania w ustawieniach.



Aktualizacja czujnika EVAD

Analogicznie przeprowadzamy aktualizację czujnika EVAD



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl