

Wskaźniki sterylizacji

Excelsior Scientific



- Test Bowie Dick
- Wskaźniki chemiczne – paski do sterylizacji
- Wskaźniki chemiczne – sterylizacja parowa
- Wskaźniki chemiczne – taśmy
- Wskaźniki biologiczne – wskaźniki fiołkowe
- Wskaźniki biologiczne – paski ze sporami
- Inkubatory do wskaźników sterylizacji



Wskaźniki sterylizacji

Test Bowie Dick

Oferujemy pakiety testowe Bowie-Dick do monitorowania procesu sterylizacji parą wodną w autoklawach próżniowych. Test Bowie-Dick składa się z szeregu paroprzepuszczalnych barier, którego centrum stanowi arkusz wskaźnika chemicznego.

Test należy umieścić w pustej komorze autoklawu, a następnie uruchomić proces sterylizacji - 134°C przez 3,5 minuty lub 121°C przez minut, podczas którego para wodna musi usunąć powietrze z całej komory.

Testy Excelsior Bowie Dick nie są produktami niebezpiecznymi i są wolne od ołowiu i innych metali ciężkich. Spełniają standardy OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Nr kat.	Opis	Opakowanie
BD -IXECS	Bowie & Dick Test Pack, (bez ciężkich metali) Spełnia wymagania normy EN 867-4	20 szt.

Wskaźniki chemiczne – paski do sterylizacji

Nr kat.	Rodzaj sterylizacji	Opis	Opakowanie
TST-5SE	Parowa	Integrator klasy 5 3,5 min/134 °C lub 16,5 min/121 °C Zmiana koloru z niebieskiego na czarny	250 szt.
TST-6SE	Parowa	Integrator klasy 6 3,5 min/134 °C Zmiana koloru z niebieskiego na różowy	250 szt.

Wskaźniki chemiczne – sterylizacja parowa

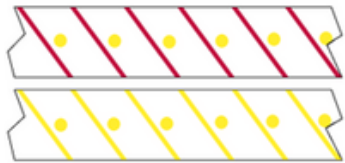
Samoprzylepne wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną.

Nr kat.	Rodzaj sterylizacji	Opis	Opakowanie	Zdjęcie przed / po ekspozycji
CPI-S01E	Parowa	Nalepka o średnicy 12,7 mm	5000 szt.	



Wskaźniki sterylizacji

Wskaźniki chemiczne – taśmy

Nr kat.	Rodzaj sterylizacji	Opis	Zmiana koloru
TAP-SCS-E	Klasa 1 Sterylizacja parowa	19 mm x 50 m 48 rolek/ pudełko	Zmiana koloru od białego do czarnego 
TAP-H-E	Sterylizacja nadtlaniem wodoru	19 x 60mm 48 rolek/pudełko	Zmiana koloru z czerwonego na żółty 

Wskaźniki biologiczne – wskaźniki fiolkowe

Do biologicznej kontroli sterylizacji wykorzystuje się spory *Geobacillus stearothermophilus*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus atrophaeus* oraz *Bacillus pumilus*. Oferujemy Państwu szeroką gamę wskaźników fiolkowych oraz mini wskaźników.

W zależności o typu sterylizacji wykorzystuje się wskaźniki o populacji spor od log 5 do log 6.

Każdy ze wskaźników zbudowany jest z plastikowej fiolki, w której umieszczone są bibułowe paski opłaszczane sporami oraz ampułki ze zmodyfikowaną pożywką TSB. Czas inkubacji wskaźnika to 24h-48h, a w przypadku wskaźników szybkiego odczytu to zaledwie 10h.

Nr kat.	Rodzaj sterylizacji	Opis	Opakowanie	Czas inkubacji
MSCS-06E	Parowa	LOG 6 SCBI <i>Geobacillus stearothermophilus</i>	100 szt.	24 h
MSCS-05E	Parowa	LOG 5 SCBI <i>Geobacillus stearothermophilus</i>	100 szt.	24 h
MSCH-06E	Nadtlenek wodoru	LOG 6 SCBI <i>Geobacillus stearothermophilus</i>	100 szt.	24 h
MSCE-06E	Tlenek etylenu	LOG 6 <i>Bacillus atrophaeus</i>	100 szt.	48 h



Wskaźniki sterylizacji

Wskaźniki biologiczne – paski ze sporami

Ten rodzaj wskaźnika to bibułowy papier o wymiarach 6 mm x 30 mm, zaszczerpiiony odpowiednimi sporami- od log 2 do log 8. Pakowane po 100 sztuk; data ważności 24 miesiące.

Po ekspozycji paski inkubujemy w pożywce zmodyfikowanej pożywce TSB przez 24-48h.

Nr kat.	Rodzaj sterylizacji	Opis	Opakowanie
STS-06E	Para wodna	LOG 6 Spore Strip in Glassine Enveloppe Geobacillus	100 szt.
STS-05E	Para wodna	LOG 5 Spore Strip in Glassine Enveloppe Geobacillus stearothermophilus	100 szt.
STN-06E	Tlenek etylenu	LOG 6 Spore Strip in Glassine Enveloppe Bacillus atrophaeus	100 szt.
STN-06DHE	Suche, gorące powietrze	LOG 6 Spore Strip in Glassine Enveloppe Bacillus atrophaeus	100 szt.

Inkubatory do wskaźników sterylizacji

W naszej ofercie znajdą Państwo także inkubator do wskaźników ampułkowych oraz fiolkowych. Urządzenie posiada 10-dołkowy aluminiowy blok oraz cyfrowy wyświetlacz. Regulacja temperatury do 70 +/-0,5° C, daje pewną inkubację wskaźnika.

Nr kat.	Opis
INC -13EE	Inkubator do wskaźników

W celu przedstawienia oferty zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielem handlowym.



A R G E N T A

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl